



Esterilizado por óxido de etileno.



Prohibido  
reprocesar

#### ENVASE

LA **SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON GLOBO** se presenta en sobre pouch, con papel apto para esterilización por óxido de etileno, con impresiones de características, y etiqueta requeridos por la autoridad sanitaria competente.

#### DESECHO

Después de su uso, deseche todos los materiales usados en un lugar apropiado para materiales potencialmente contaminados.

#### CONTRA INDICACIONES

Siempre que se use de acuerdo con las instrucciones de uso, no tiene contraindicaciones.

#### EFECTOS COLATERALES

Siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones de uso, no tiene efectos secundarios, sin embargo las posibles contraindicaciones, precauciones y advertencias se describen en este documento. No se han observado reacciones adversas con el uso de productos 100% de silicona.

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF -SP 54659  
REG ANVISA: 80423540041



**GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA**  
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia  
CEP 18085-300 Sorocaba – SP  
CNPJ 08.633.431/0001-05  
Tel/fax: 15 3238-4100

## SONDA PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON GLOBO

### PRESENTACIONES


LA **SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON GLOBO** es un tubo transparente con una línea radiopaca 100% silicona con tres vías de acceso, una vía central utilizada para la alimentación enteral, siendo las vías laterales la vía coloreada con válvula para inflado del balón, y otra para hidratación y medicación.

El globo está ubicado en el extremo distal.

La sonda en su extremo proximal tiene dos accesos con tapa de oclusión, uno central y otro lateral. Tiene marcas cada cm desde el extremo distal.

Hay un anillo de fijación externo ubicado en el cuerpo de la sonda que permite el ajuste a diferentes espesores de la pared abdominal, está fabricado en silicona 100% transparente. Tiene un extensor que sirve para conectar el tubo central de la sonda y facilitar la alimentación independiente al equipo que se utilizará, así como conexión de jeringa slip o luer lock.

### ESQUEMA DEL PRODUCTO

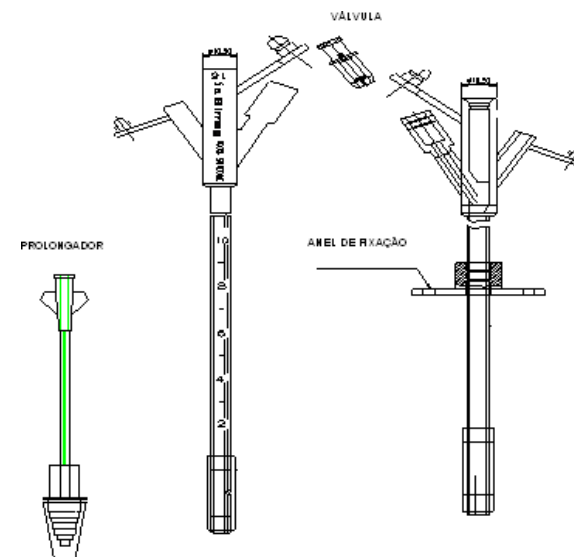

Son presentados en las siguientes dimensiones:

<b>CÓD: 330-SONDA PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON GLOBO ADULTO – INSULFLACIÓN DEL GLOBO 20 ML</b>			
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CH/FR</b>	<b>Diámetro externo (mm)</b>	<b>Longitud (mm)</b>
330-18	18	6.00	200
330-20	20	6.70	200
330-22	22	7.30	200
330-24	24	8.00	200

<b>CÓD-331-SONDA PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON GLOBO PEDIÁTRICO - INSULFLACIÓN DEL GLOBO 5 ML</b>			
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CH/FR</b>	<b>Diámetro externo (mm)</b>	<b>Longitud (mm)</b>
331-14	14	4.70	200
331-16	16	5.30	200
331-18	18	6.00	200
331-20	20	6.70	200

#### FINALIDAD/INDICACIONES

La sonda de gastrostomía percutánea tiene como objetivo mantener la ingesta nutricional y mejorar la calidad de vida y supervivencia de los pacientes.

Indicado para pacientes que no pueden ingerir alimentos y medicamentos por vía oral. Pacientes con reflujo gastroesofágico. Malformaciones del tracto digestivo superior. Pacientes sometidos a cirugía gastroesofágica. Pacientes con gastrostomía y enterostomía transitoria o permanente.

#### INSTRUCCIONES DE USO

En cuanto a las técnicas de inserción y cuidados al retirar la sonda, se sugieren las siguientes instrucciones, pero varían según las circunstancias específicas de cada caso.

- El tubo de gastrostomía con globo generalmente se coloca durante una cirugía abdominal (en la pared interna del abdomen);
- Una vez que el tubo esté fijado en su posición, infle el globo (5 ml para el tubo pediátrico y 20 ml para el tubo adulto) y presione el anillo de fijación en la pared abdominal externa;
- La sonda se puede utilizar para alimentar y/o descomprimir la cavidad gástrica.

#### Para iniciar el proceso de medicación:

- Conectar la jeringa a la sonda o adaptador proporcionado por la empresa y lavar con agua filtrada o destilada.
- Luego conecte la jeringa con el medicamento y realice una infusión en bolus;
- Cuando termine, vuelva a lavar la sonda con agua filtrada o destilada.

#### Para iniciar el proceso de alimentación:

- Conectar el equipo de infusión al tubo principal de la sonda o conectar el extensor proporcionado por la empresa para facilitar la adaptación de los distintos juegos de equipos existentes en el mercado.
- Ajuste la velocidad de infusión si es necesario;
- Registre la hora de inicio, las características de la dieta, la velocidad y la temperatura de infusión;
- Al final de la infusión, lave la sonda con agua destilada o filtrada.

#### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

**El fabricante recomienda que el tiempo máximo de permanencia de la sonda sea de 30 (trinta) días.**



#### RECOMENDACIONES

- Verifique la integridad del envase.
- Verifique las fechas de esterilización y vencimiento.
- Mantenga el producto en un lugar fresco y ventilado protegido de la luz solar.
- Realizar cuidados posteriores según criterio institucional/profesional.
- Mantenga la sonda en la posición adecuada antes de iniciar el procedimiento.
- Realice el cambio de la sonda de acuerdo con el protocolo.
- Explicar los cuidados al paciente y familiares en caso de tratamiento domiciliario.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Prohibido reprocessar.
- Se sugiere verificar la posición por radiología antes de iniciar el proceso de alimentación.
- Lave la sonda con agua destilada o filtrada antes y después de cada toma/medicamento.
- Si el paciente experimenta náuseas o vómitos, suspenda el procedimiento de alimentación y proceda con la descompresión en la cavidad gástrica y permita que el paciente se recupere.
- Para la alimentación, descompresión y cuidado con la sonda, realizar el procedimiento cumpliendo con las normas institucionales y criterios médicos.