


## **OROPHAR - CÁNULA OROFARÍNGEA DOBLE LUMEN GMI**

**Demostrativo con las especificaciones de los modelos:**

**Códigos:**

540.5.90	OROPHAR 90 MM
540.5.100	OROPHAR 100 MM

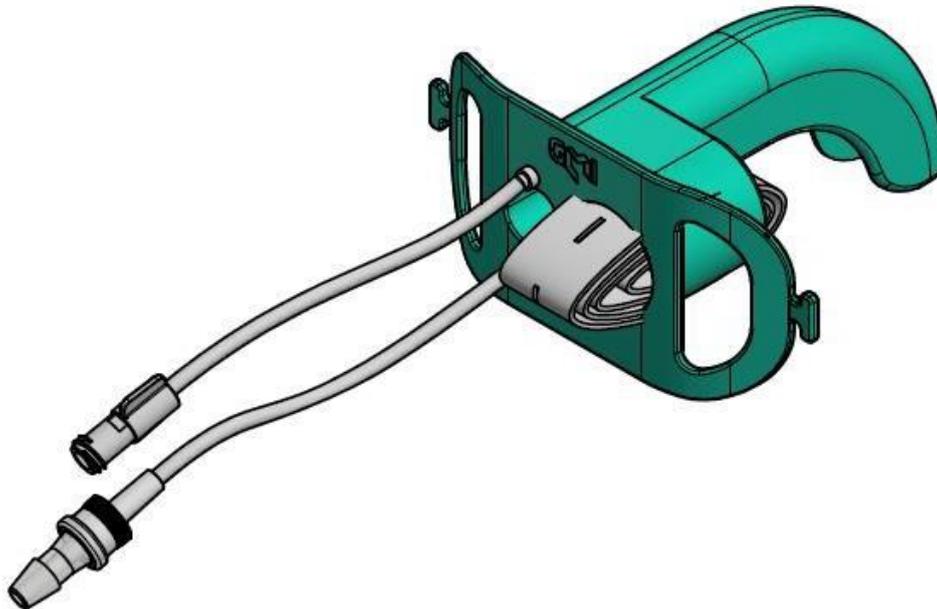

### **Indicación de uso**

El objetivo principal del OROPHAR - CÁNULA OROFARÍNGEA DOBLE LUMEN es mantener la permeabilidad de las vías respiratorias durante los procedimientos endoscópicos. Puede utilizarse en sedación profunda con ventilación espontánea o con ventilación invasiva con presión positiva.

Está indicado en procedimientos anestésicos como endoscopia de vía aérea, fibrobroncoscopia, endoscopia del tracto digestivo, ecocardiografía transesofágica y CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica).



Facilita la inserción de sondas endoscópicas, protegiéndolas del daño causado a la fibra óptica por la mordedura.

### **Principio de Funcionamiento y Mecanismo de Acción**

La OROPHAR - CÁNULA OROFARÍNGEA DOBLE LUMEN protege y despeja las vías respiratorias contra la caída de la lengua en la faringe posterior.

### **Modo de Uso del Producto**

#### 1) Endoscopia de vía digestiva

Colocar la banda elástica para el cuello antes de iniciar la sedación, dejando ambos extremos libres.

Una vez iniciada la sedación (pérdida del reflejo corneal-palpebral), se puede insertar la cánula.

Con una mano, abra la boca del paciente, baje la lengua con el dedo índice, el pulgar o un depresor de lengua.

El dispositivo debe estar centrado sobre el labio superior del paciente y el protector de mordida debe estar entre los dientes incisivos (superior e inferior).

Coloque la banda elástica para el cuello en la cánula y ajuste la presión para que la cánula esté firme. Para mayor comodidad y seguridad, ajuste las correas en ambos lados. No apriete demasiado.

Después de fijar la banda elástica, se debe conectar el medidor de CO<sub>2</sub> y el catéter de oxígeno.

O<sub>2</sub>, caudalímetro de oxígeno a un caudal de 2 a 4 litros/min

CO<sub>2</sub>, conectado al capnógrafo o analizador de gases, para lectura de CO<sub>2</sub>.

Inserte la sonda a través del orificio redondo (A)

#### 2) Endoscopia de las vías respiratorias (broncofibroscopía flexible - acceso en casos de intubación endotraqueal difícil)

Colocar la banda elástica para el cuello antes de iniciar la sedación, dejando ambos extremos libres.

Una vez iniciada la sedación (pérdida del reflejo corneal-palpebral), se puede insertar la cánula.

Con una mano, abra la boca del paciente, baje la lengua con el dedo índice, el pulgar o



un depresor de lengua.



El dispositivo debe estar centrado sobre el labio superior del paciente y el protector de mordida debe estar entre los dientes incisivos (superior e inferior).

Coloque la banda elástica para el cuello en la cánula y ajuste la presión para que la cánula esté firme. Para mayor comodidad y seguridad, ajuste las correas en ambos lados. No apriete demasiado.

Después de fijar la banda elástica, se debe conectar el medidor de CO<sub>2</sub> y el catéter de oxígeno.

O<sub>2</sub>, caudalímetro de oxígeno a un caudal de 2 a 4 litros/min.

CO<sub>2</sub>, conectado al capnógrafo o analizador de gases, para lectura de CO<sub>2</sub>.

Inserte la sonda a través del orificio cuadrado (B)

Cuidado de rutina

Verificar el correcto posicionamiento de la cánula, observando las lecturas de gas, mediante capnografía y oximetría arterial, además de parámetros clínicos como respiración libre y expansión torácica.

Cómo retirar

Después de retirar la sonda endoscópica, suelte la banda elástica de la cánula, observe la apertura de la boca para que no haya traumatismo dental o labial y retire la cánula del paciente.

### **Condiciones de Manipulación**

1. Debe ser manejado por un profesional médico debidamente capacitado;
2. Utilizar las técnicas asépticas recomendadas según el protocolo institucional establecido por la Unidad de Salud;
3. Verifique la validez del artículo así como las condiciones del envase antes de usarlo;
4. Siga estrictamente las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante.

### **Advertencias**

La OROPHAR - CÁNULA OROFARÍNGEA DOBLE LUMEN se evaluó en una población adulta. Este producto no está diseñado para su uso en pacientes pediátricos.

Los factores de idoneidad a considerar incluyen pacientes con dientes protuberantes, dientes sueltos o blandos, tumores en la cavidad bucal y restricción de la apertura de la boca.

El fabricante recomienda un solo uso.



### **Contra indicaciones**

Siempre que se use de acuerdo con las instrucciones de uso, no tiene contraindicaciones.

### **Efectos adversos**

Siempre que se use de acuerdo con las instrucciones de uso, no tiene efectos secundarios.

### **Condiciones de Almacenamiento y Transporte**

El producto debe almacenarse en un ambiente limpio y seco, a temperatura ambiente, protegido de la luz y la humedad excesiva.



Producto No Estéril

Resp. Técnica - Dra. Josimra dos Santos Almeida Possidonio - CRF-SP 54.659

REG ANVISA: 80423540061



**GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA**

Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia

CEP 18085-300 Sorocaba – SP

CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax:15 3238-4100.