


COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (NEONATAL)-GMI

APRESENTAÇÕES

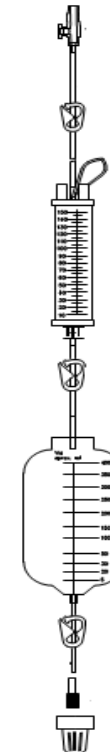

ESQUEMA DO PRODUTO

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659
REG ANVISA: 80423540002



GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia
CEP 18085-300 Sorocaba – SP
CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax: 15 3238-4100

TABELA DO PRODUTO

Código	Bureta graduada	Bolsa coletora	Extensão em PVC
499-S	150 ml	400 ml	60 cm

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO NEONATAL GMI (Código 499-S).

Contém uma bureta de 150 ml graduada para coleta de urina com anel medidor de nível, prolongamento em tubo de PVC de 60 cm, clamp, ponto de coleta, conector escalonado que se adapta ao extremo proximal da sonda e no outro extremo um prolongamento em PVC de 13 cm com clamp e conexão direta. Bolsa com capacidade de 400 ml para armazenamento de urina, com clamp, conector luer lock e tampa macho luer lock para fechamento.

FINALIDADE/ INDICAÇÕES

- Para controle urinário rigoroso em pacientes críticos neonatais.
- Obtenção de amostra estéril de urina para fins diagnósticos.

INSTRUÇÕES DE USO

- Instalar sonda uretral com técnica asséptica;
- Após passagem de sonda uretral, conectar a sonda ao coletor de urina;
- Verificar se a conexão da sonda ao coletor está seguramente acoplada;
- Posicionar o coletor abaixo do nível do paciente e realizar abertura do primeiro clamp;
- Observar se o clamp entre a bureta e bolsa coletora, e o clamp final estão fechados, para evitar extravasamento;

CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes com obstrução total ou parcial de uretra e/ou lesões em seu trato.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Realizar o procedimento sob estritas normas de assepsia;

- Avaliar constantemente a drenagem da urina, pois a obstrução da via de saída pode provocar distensão vesical.



RECOMENDAÇÕES

- Verificar a integridade da embalagem.
- Verificar as datas de esterilização e vencimento.
- Manter o produto em lugar fresco, arejado, protegido de raios solares.

STERILE EO

Esterilizado por óxido de etileno.



Proibido reprocessar

EMBALAGEM

Embalagem de papel grau cirúrgico apto a esterilização por óxido de etileno, com impressões de características, lote de produção e etiqueta exigidas pela autoridade sanitária competente.

DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

EFEITOS COLATERAIS

Desde que utilizado de acordo com as instruções de uso, não apresenta efeitos colaterais, todavia as possíveis contraindicações, precauções e advertências estão descritas neste documento.