

EFEITOS COLATERAIS

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e efeitos colaterais.

Não se tem observado reações adversas com a utilização de produtos 100% silicone.

STERILE EO

Esterilizado por Óxido de Etileno



Produto de uso único. Proibido reprocessar

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659
REG ANVISA: 80423540010




GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia
CEP 18085-300 Sorocaba – SP
CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax: 15 3238-4100



REF 420

SONDA NELATON GMI

APRESENTAÇÃO

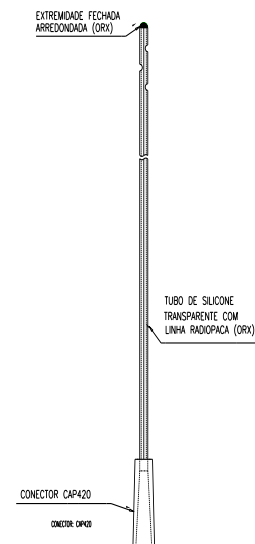

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

A SONDA NELATON GMI é um segmento de tubulação 100% silicone translúcido com uma linha longitudinal radiopaca, cujo comprimento é de 400 mm e seu calibre varia de acordo com o código.

Apresenta uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente.

O conector do extremo proximal é de forma cônica com perfeito encaixe para conexões.

SÃO APRESENTADAS NAS SEGUINTE DIMENSÕES E CÓDIGOS:

CÓDIGO	CH/FR	Diâm. Ext. (mm)	Diâm. Int. (mm)
420-04	04	1.40	0,75
420-06	06	2.00	1.00
420-08	08	2.70	1.50
420-10	10	3.30	2.00
420-12	12	4.00	2.50
420-14	14	4.70	3.00

FINALIDADE/ INDICAÇÕES

Esvaziamento vesical em caso de retenção urinária. Obtenção de amostra estéril de urina com fins diagnósticos. Pacientes submetidos a cirurgias.

INSTRUÇÕES DE USO

Quanto às técnicas de inserção, o cuidado ao retirar a sonda varia de acordo com as circunstâncias específicas para cada caso, são sugeridas as seguintes instruções:

- Colocar o paciente em posição de litotomia.
- Realizar a assepsia correspondente da zona perineal.
- Colocar o campo estéril.
- Colocar luvas esterilizadas.
- Com a mão dominante segurar a **Sonda Nelaton GMI**.
- Fazer lubrificação prévia com lubrificante hidrossolúvel estéril.
- Introduza lentamente na uretra do paciente.
- Extrair a amostra de urina ou permitir o esvaziamento da bexiga de acordo com a indicação médica.
- Retirar a sonda e deixar o paciente confortável.

CONTRA INDICAÇÕES

Pacientes com obstrução total ou parcial de uretra e/ou lesões em seu trato.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Realizar o procedimento sob estritas normas de assepsia.
- O produto deve ser aplicado sob a estrita supervisão de um profissional da saúde habilitado e treinado.
- O paciente deve ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e tratamento.
- Suspender o procedimento se houver resistência ao inserir a sonda.



RECOMENDAÇÕES

- Verificar a integridade da embalagem.
- Verificar as datas de esterilização e vencimento.
- Manter o produto em lugar fresco, arejado, protegido de raios solares.

EMBALAGEM

A Sonda NELATON GMI é apresentada em envelope pouch, com papel apto a esterilização por ETO, com impressões características, lote de produção e etiqueta exigidas pela autoridade sanitária competente.

DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.